

medi SAS[®] 45

Schulterabduktionsschiene
 Shoulder abduction splint
 Orthèse d'abduction de l'épaule
 Férula para abducción de hombro

Gebrauchsanweisung. Instructions for use. Mode d'emploi.
 Instrucciones de uso. Instruções para aplicação. Istruzioni per l'uso.
 Gebruiksaanwijzing. Brugsvejledning. Bruksanvisning.
 Návod k použití. Uputa za uporabu. Инструкция по использованию.
 Kullannusohje. Instrukcja załadania. Οδηγία εφαρμογής. Használati útmutató.
 Uputstvo za upotrebu. 使用说明.



1




2



3



4

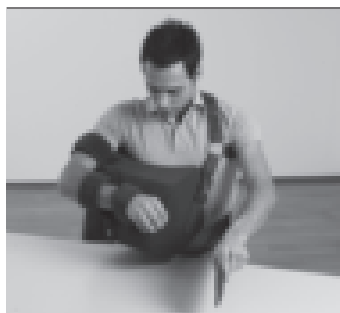

5



6

medi SAS® 45

Назначение

Отводящая шина medi SAS 45 может быть использован только в случае отсутствия заболеваний и повреждений кожи непосредственно в области применения шины в качестве раневого покрытия.

Показания

- Состояние после реконструкции муфты ротаторов
- Иммобилизация после имплантации протеза плечевого сустава
- Консервативная или послеоперационная терапия субакромиального бурсита
- После акромиопластики
- Снятие напряжения компонентов суставной капсулы сустава после открытой и артроскопической стабилизации плеча
- Иммобилизация верхней конечности при вывихе плеча

Противопоказания

До настоящего времени не выявлены.

Важные замечания

Угол отведения необходимо изменять только по рекомендации врача.

Рекомендации по применению

Шина medi SAS 45 универсального размера.

Возможно использование изделия для правой и левой руки с целью отведения на 45° или 30°.

- Расстегните все ремни, в том числе, в области кисти.
- Поместите подушку на талию с пораженной стороны и перекиньте плечевой ремень через здоровое

плечо. Прикрепите ремни к подушке с помощью застежки-липучки сначала сзади, а затем спереди.

- Закрепите конец пояса на передней поверхности подушки. Закрепите тренажер для кисти на верхней поверхности подушки с помощью застежек-липучек.
- Закрепите две ленты для предплечья на подушке сверху тренажера для кисти, затем по диагонали прикрепите к подушке ленту для плеча. Лента для плеча предотвращает соскальзывание руки назад.
- Проденьте Вашу руку через ленты, закрепленные на подушках, и застегните застежки-липучки. Убедитесь, что в застегнутом состоянии ленты не стянуты слишком туго. Смена угла отведения (45° или 30°) обеспечивается просто поворотом подушки.

Внимание: следите, чтобы головка плеча не смещалась вверх, когда рука расположена на подушке!

Рекомендации по уходу

Не носить изделие в воде. Перед стиркой застегните застежки-липучки. Остатки мыла, кремы или мази могут вызвать раздражение кожи и износ материала.

- Стирайте наволочки, карманы и ремни предпочтительно с использованием мощного средства medi clean вручную или в шадящем режиме стирки при температуре 30 °C с мягким моющим средством без использования ополаскивателя.
- Не отбеливать.
- Сушить на воздухе.
- Не гладить.
- Не подвергать химической чистке.



Рекомендации по хранению

Храните изделие в сухом месте.

Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок эксплуатации 6 месяцев со дня покупки при соблюдении покупателем правил, изложенных в инструкции по использованию и уходу, прилагаемой к каждому изделию.

Материалы

пенополиуретан, полиамид

Гарантия

в объемах, предусмотренных законодательством.

Утилизация

Изделие можно утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Ваша компания medi

желает Вам скорейшего выздоровления!